

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**БИНТОВ ГИПСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДСТВА ООО «НЬЮФАРМ»**

**ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Подготовить емкость с водой. Рекомендуется использовать воду комнатной температуры (примерно 20 градусов). Глубина емкости с водой для замачивания должна обеспечивать полное вертикальное погружение рулончика.

**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

Сняв упаковку с бинта, не выпуская бинт из руки, опустите его в воду, желательно вертикально, для обеспечения полного и быстрого выхода воздуха из рулончика, так как полное смачивание бинта происходит за 15-20 секунд.

Выньте бинт из воды, слегка отжав его, не опасаясь, что гипсовая смесь будет вытекать. Необходимое количество гипса все равно останется на бинте. Время сгущения, после которого моделирование и добавление воды недопустимо составляет 1,5-2 мин. после замачивания.

Первичная прочность наступает уже через 2-4 мин. для быстросхватывающихся бинтов и через 5-10 минут для типовых бинтов. Спустя 30 мин. достигается основная прочность для влажной гипсовой повязки. Окончательная прочность наступает после полного высыхания воды из гипсовой повязки. Время полного высыхания зависит от параметров окружающей среды и температуры тела, на которое нанесена повязка.

Следует помнить!!! Слабый отжим (оставленное большое количество воды в рулончике) в процессе замачивания приводит к слегка удлинённому времени схватывания и сушки; сильный отжим (малое количество воды) - к затруднению моделирования.

**ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Бинты гипсовые очень гигроскопичны, поэтому должны храниться в условиях, исключающих увлажнение. Рекомендуется распаковывать их непосредственно перед наложением повязки. Бинты следует хранить в сухом месте.